

系統基本知識

Ultraview Care 網路監護儀對所有的病床邊和中央監護環境提供一致的操作員介面。安裝於網路上的監護儀可從一台監護儀訪問其他監護儀，使您能夠控制遠端資料。

聯網的監護儀使您可以查看病人參數的波形和數值，檢查生命體征、心電圖心律異常和竇性心動過速的既往記錄，並在報警事件過程中自動記錄病人資料。進一步資訊請參閱第 1-9 頁上“網路初步”一節的內容。

- 中央工作站根據主治醫師在床邊選定的設定顯示病人的特定參數，遠端報警和報警極限。有關系統能力的詳細資訊，請參閱第 6-1 頁上“中央監護儀”一節的內容。
- 遠端視圖功能使您能夠同時監視兩位元病人。波形和數值的遠端視圖在顯示和功能上都幾乎和起源監護儀的參數完全相同。報警、趨勢、功能表鍵和記錄都可以通過“遠端視圖”來訪問。進一步資訊請參閱第 1-11 頁上“查看遠端參數”和第 2-1 頁上“報警”部分的內容。
- “通用臨床工作站 (UCW)” 或 90387 **Ultraview 1700** 的“全功能床邊檢查”功能使您能夠從任何其他聯網的 UCW 或 **Ultraview 1700** 病床或中央監護儀上查看一台 UCW 或 **Ultraview 1700** 病床監護儀。進一步資訊請參閱第 1-12 頁上“全功能床邊檢查”一節的內容。
- “報警監視”功能可在網路上任何其他監護儀出現報警時向您發出通知。進一步資訊請參閱第 2-8 頁上“報警監視”一節的內容。
- 生命體征趨勢提供每分鐘參數資料記錄，供查閱和記入病人病歷。您可選擇趨勢記錄的格式和時間間隔。請參閱第 21-1 頁上“趨勢”一節的內容。
- 可選擇的計算功能提供高級臨床變數的自動計算和趨勢分析，包括血液動力學、腎臟、氧合作用、換氣計算和藥物劑量。請參閱第 20-1 頁上“計算”一節的內容。

91416-A/B 彩色顯示能力

91416-A/B 觸屏彩色顯示和不同的監護儀結合使用時提供不同的功能。

91416-A 和 90386 UCW 獨立顯示或和 90387 **Ultraview 1700** 結合使用時，其功能和 90385 UCW 完全相同。

91416-B 和 90364 **Ultraview 1600** 結合使用時，其功能和 90363 **Ultraview 1500** 完全相同。